



N° de LOT

NOTICE D'UTILISATION SECURIMASK® AERO

**Masque grand public filtration supérieure à 90%
masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.**

Ce masque a **démonstré une efficacité de filtration supérieure à 90% pour des particules de 3 microns** émises par la personne portant le masque **après 50 lavages**.

La respirabilité du masque a été mesurée à >96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4h.

Ce masque suit le protocole d'essai décrit dans le document DGA du 25 mars 2020. Il **bénéficie d'un rapport DGA RP/20-3046 du 17/04/20 à neuf** et d'un **RAPPORT GROUPE MULLIEZ-FLORY 2020-04-17-013 50 lavages**. Masque conforme au guide AFNOR SPEC S 76-001.

➔ **Composition principale des tissus** : Toile face extérieure 65% polyester 35% coton 150g/m² - Maille piquée face intérieure 60% coton 40% polyester 185g/m²

POUR PROTEGER VOTRE SANTE ET CELLE DES AUTRES RESPECTER CETTE NOTICE

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Notre Sécurimask AERO possède un système d'identification (Endroit/Envers/haut/bas) bien visible et compréhensible par tous.

1 - les coloris intérieur et extérieur sont différents (nuance de couleur)

2 - la face intérieure est identifiée par la présence de l'étiquette

3 - et selon les modèles, le sens du masque est facilement repérable grâce à la présence de la barrette nasale (en haut) et de la tirette lien réglable (en bas) ce qui permet au porteur de ne pas se tromper.

Avant de le mettre :

Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.

1. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
2. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
3. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :

1. Tenez le masque par les élastiques ou liens.
2. Placez-le au niveau de votre bouche.
3. Passez les liens ou élastiques derrière la tête.
4. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton, en utilisant les liens réglables si votre modèle en est doté.

Lorsque vous le portez :

1. Évitez de le toucher et de le déplacer.
2. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

1. Quand vous avez porté le masque 4h.
2. Quand vous souhaitez boire ou manger.
3. Quand il devient difficile de respirer.
4. Si le masque s'humidifie.
5. Si le masque est endommagé (élastiques, liens ou tissus)
6. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

1. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
2. Enlevez les liens ou élastiques pour décoller le masque de votre visage.
3. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
4. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
5. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

COMMENT ENTREtenir LE MASQUE ?

Avant ouverture :

1. Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Pour le lavage :

1. Selon l'avis de l'ANSM du 25 mars 2020 révisé le 02/11/2020 V4 et afin de garantir l'élimination des virus du type du SARS-Cov-2 :
 - a. Traitement en blanchisserie industrielle : Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
 - b. Traitement par les particuliers : Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 40°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
2. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
3. Ce masque a été testé pour 50 lavages. Après 50 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.
4. Lorsque la machine est terminée, sortez-le et en reformez les plis sans forcer.

Après le lavage :

1. Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches)
2. Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
3. Repassez votre masque à la vapeur et à la température 1
4. Dès que le masque est sec, stockez le dans un emballage propre et hermétique (sachet plastique ou sac de congélation par exemple).

ATTENTION : Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus

DÉCOMPTÉ D'UTILISATION DES MASQUES

Les masques pouvant être lavés 50 fois, chaque masque est donc utilisable 50 fois. Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases :



	Masque 1	Masque 2	Masque 3	Masque 4	Masque 5	Masque 6
Utilisation 1						
Utilisation 2						
Utilisation 3						
Utilisation 4						
Utilisation 5						
Utilisation 6						
Utilisation 7						
Utilisation 8						
Utilisation 9						
Utilisation 10						
Utilisation 11						
Utilisation 12						
Utilisation 13						
Utilisation 14						
Utilisation 15						
Utilisation 16						
Utilisation 17						
Utilisation 18						
Utilisation 19						
Utilisation 20						
Utilisation 21						
Utilisation 22						
Utilisation 23						
Utilisation 24						
Utilisation 25						



	Masque 1	Masque 2	Masque 3	Masque 4	Masque 5	Masque 6
Utilisation 26						
Utilisation 27						
Utilisation 28						
Utilisation 29						
Utilisation 30						
Utilisation 31						
Utilisation 32						
Utilisation 33						
Utilisation 34						
Utilisation 35						
Utilisation 36						
Utilisation 37						
Utilisation 38						
Utilisation 39						
Utilisation 40						
Utilisation 41						
Utilisation 42						
Utilisation 43						
Utilisation 44						
Utilisation 45						
Utilisation 46						
Utilisation 47						
Utilisation 48						
Utilisation 49						
Utilisation 50						