

MASQUE EN TEXTILE MICROFILAMENT

# SECURIMASK EVOLON® C1

ÉLASTIQUES - REF : 037883 W03ZZ

selon le référentiel AFNOR (USAGE NON SANITAIRE)

Lavable\*, réutilisable, très doux  
avec fixation élastique derrière les oreilles



## PERFORMANCES DU TISSU EVOLON® TESTÉ PAR LA DGA

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m<sup>2</sup>.S-1 pour une dépression de 100 Pa

Masque testé conforme à la catégorie 1 après 30 lavages

## AVANTAGES DU SECURIMASK EVOLON®

Les textiles en Evolon® combinent de très bonnes caractéristiques textiles et mécaniques.

Comme la microfibre traditionnelle, ils sont doux, souples et légers, et en même temps très résistants.

La matière Evolon® est respirante grâce à la très grande surface intérieure des microfilaments extrêmement fins. Ces derniers créent des millions de «microcanaux» permettant la circulation de l'air.

Le transfert d'humidité est optimisé et permet ainsi à la vapeur d'eau et à la transpiration d'être absorbées.

Le SECURIMASK Evolon® C1 sèche très rapidement et évite le contact mouillé avec la peau.

Sa texture en microfilaments est très résistante. Le tissu ne se déforme pas, même après un usage intensif et de nombreux lavages.

\* Lavez votre masque dans une taie d'oreiller ou un filet de lavage afin de le préserver du frottement avec d'autres vêtements.



RESPIRANT



ABSORBANT



RÉSISTANT

## COMPOSITION DE LA MATIÈRE PRINCIPALE EVOLON® C1


Tissu 1 couche 80g/m<sup>2</sup>: 70% polyester - 30% polyamide



## RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION

- Laver le masque avant 1ère utilisation de préférence dans une taie d'oreiller ou un sac de lavage.
- Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage (vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte).
- Une fois en place éviter de le toucher, ne pas le déplacer. En cas de contact avec le masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.
- Changer le masque : pour boire ou manger, s'il devient humide ou s'il est défectueux (accroc).
- Pour retirer le masque, l'enlever par les élastiques (ne pas toucher le devant du masque), le placer immédiatement dans le sac prévu à cet usage (plastique ou tissu) puis se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.

ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.  
Le groupe Mulliez-Flory est certifié RSE 26001 par l'organisme Ecocert Environnement

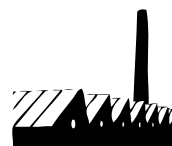

**MULLIEZ-FLORY**  
Dress for business

BP 1 - Le Longeron  
49710 SEVREMOINE  
Tél : 02 41 63 78 10 - Fax : 02 41 46 60 19  
www.mulliez-flory.fr

