



TISSAGE DU MOULIN  
6 rue Kleindorf  
68460 Lutterbach

Notice d'utilisation accompagnant la mise sur le marché de Masques à Usages Non Sanitaires suivant la note d'information interministérielle publiée le 29 mars 2020 mise à jour le 26 avril 2020

## Masque Anti projection EVOLON® 80 Grand Public UNS 1 à usage des professionnels en contact avec le public.

Domaine d'utilisation : ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires(UNS); Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé **aux professionnels amenés à recevoir régulièrement du public** dans le cadre de leurs activités professionnelles (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Composition de la matière principale : Tissu une couche 80g/m2 Evolon 80 PK® 70 % Polyester - 30 % Polyamide

**Performances selon** Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

**Masque catégorie 1 "UNS1"** masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Ce masque est destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public.

Efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90%

Respirabilité \* : essai de perméabilité à l'air > 96 l.m<sup>-2</sup>s<sup>-1</sup> pour une dépression de 100 Pa

*Niveau de performance : Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires LPMT et LGRE de l'UHA en accord avec la DGE sous recommandation DGA (rapport 20200515-P04-PTA-EVO 80 PK -Test complet émis par le PTA 25 rue Alfred Werner 68059 Mulhouse Cedex02) et qui supporte 30 lavages (rapport 20200515-P04-PTA-EVO 80 PK -Test complet émis par le PTA 25 rue Alfred Werner 68059 Mulhouse Cedex 2)*

<https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/entreprises-comment-faire-tester-masques>

\*Mesure de respirabilité complétée par un test au porté pendant 4 heures réalisé par l'industriel

Stockage : Les masques non utilisés sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Utilisation : Le temps du port du masque est limité à 4 heures.

Recommandations de manipulation des masques : **Pour votre sécurité et celle des autres, veillez à appliquer scrupuleusement cette notice d'utilisation du masque.**

Avant la première utilisation, laver les masques selon les indications ci-dessous. Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique, appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à ajuster au mieux sur le visage; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte. Lorsque l'on porte un masque éviter de le toucher, ne pas le déplacer. Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro alcoolique. Si besoin de boire ou de manger changer de masque. Lorsqu'il s'humidifie le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique. Pour enlever le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher l'avant du masque) le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique.

Entretien des masques : Après utilisation le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage, ou dans un sac réutilisable à laver ; dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac. Porter des gants ou bien se laver les mains après la manipulation.

Conditions d'entretien :



Méthode de lavage : Lavage en machine ménager avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30mn à 60 °C - l'utilisation d'un filet de lavage est recommandé - séchage mécanique ou séchage conventionnel suivi dans les deux cas d'un repassage à température 120/130 °( synthétique )

Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.